

ST PEN TECHNISCHE DATEN

Mikronadel-Therapieapplikator mit Vibration, um Kosmetika durch Mikropuncturen automatisch in die Haut eindringen zu lassen.

Adapter:

6V-300MA  
2 Lithium-Batterien  
Größe: 14,7 x 3,1 cm



## ZUSAMMENSETZUNG

1. Körper                      2. Adapter (110/220V)                      3. Nadel (Optional)

Bestandteile: Nadelpatronen, Installation der Nadelpatronen, Einstellung der Nadellänge, Anschlussadapter, Geschwindigkeitseinstellung, Ein/Aus.

## BETRIEB

Stellen Sie sicher, dass der Applikator mindestens eine Stunde lang aufgeladen wurde. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Anzeigeleuchte blau leuchtet.

### Vorbereitung

Nehmen Sie die Nadelpatrone aus der sterilisierten Verpackung.

Setzen Sie die Nadelpatrone in die halbkreisförmigen Schlitze des Geräts ein und drücken Sie sie waagrecht, bis sie einrastet.

Sichern Sie die Patrone, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

Die Einstellung der Nadellänge muss nach dem Einschalten der Maschine vorgenommen werden.

Wenn Sie den Kopf abnehmen möchten, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und schieben Sie ihn waagrecht nach außen.

### Einstellung von Geschwindigkeit und Nadellänge

Ein- und Ausschalten und Einstellen der Geschwindigkeit

Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie die Taste leicht und wiederholt, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Die Geschwindigkeit wird durch die Farbe der Anzeige angezeigt: rot, lila, dunkelblau, hellblau und grün.

Einstellen der Nadellänge:

-Drehen Sie die Nadeln gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu verkürzen.

-Drehen Sie die Nadeln im Uhrzeigersinn, um sie länger zu machen.

Anweisungen:

EIN/AUS. Halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Geschwindigkeit einstellen: Drücken Sie die Taste leicht, um die Geschwindigkeit und die Farbe der Anzeige zu ändern.

ON/OFF  
SPEED BUT ON



FARBEN	TIEFE	GESCHWINDIGKEIT
Grün/	0.25mm	6500 rpm – 108 Zyklen/Sekunde
Hellblau	0.50 mm	7500 rpm – 125 Zyklen/Sekunde
Dunkelblau	1.00 mm	8500 rpm – 141 Zyklen/Sekunde
Lila	Gesichtsbehandlungen	9500 rpm – 158 Zyklen/Sekunde
Rot		10.500 rpm – 166 Zyklen/Sekunde

**VORSICHTSMASSNAHMEN: NICHT IN FOLGENDEN FÄLLEN VERWENDEN:**

Menschen, die krank sind oder eine Temperatur von über 38°C haben. Menschen mit Allergien oder Bluter.

Melanose im Gesicht.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, Staub oder Feuchtigkeit: dies kann zu Fehlfunktionen führen.

Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, nehmen Sie es nicht auseinander und verändern Sie nicht die Patrone oder den Stift.

Nicht mit nassen Händen benutzen oder berühren, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt oder abisoliert ist, da dies zu Verletzungen der Haut führen kann.

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Überprüfen Sie den ST PEN regelmäßig. Wenn Sie einen Schaden oder ein Problem feststellen, lassen Sie ihn reparieren.

Der ST PEN darf nur von qualifiziertem Fachpersonal benutzt werden. Jede unsachgemäße Verwendung kann zu Unfällen oder Fehlfunktion führen.

## ST PEN AND L'ESPRIT DERMATOLOGIQUE LAB PROTOKOLL

ST PEN ist ein sterilisiertes und austauschbares Mikronadelgerät für das Micro-Needling der Haut. Dieses Mikropunktursystem stimuliert automatisch die Broblasten und fördert so die Bildung von Kollagen und Elastin zur Straffung und Verjüngung der Haut.

Der automatische Nadeleinstich des ST PEN minimiert Schmerzen und Beschwerden und stärkt gleichzeitig die Leitungskanäle, was die Aufnahme und transepidermale Wirkung der Wirkstoffe begünstigt.

L'ESPRIT DERMATOLOGIQUE LAB setzt die neueste Technologie ein, um kosmetische Probleme im Gesicht hochwirksam und sicher zu behandeln.

Durch die Verwendung seiner Konzentrate werden optimale Ergebnisse bei der Behandlung der chronologischen, lichtbedingten und hormonellen Alterung sowie bei der Straffung des Gesichts, der Wiederherstellung oder und zur Regeneration der Haut, wobei bereits bei der ersten Anwendung lang anhaltende und deutlich sichtbare Ergebnisse erzielt werden.

Die Mikropunktur ist auch eine sehr wichtige Methode, um die Haut mit Feuchtigkeit, Antioxidantien, Vitaminen, Nährstoffen usw. zu versorgen.

**HYALUROHYALURONSÄURE:** unvernetzt, 1,5% in einer phosphatgepufferten Kochsalzlösung. Seine breit angelegte hygroskopische Wirkung, indem es große Mengen an Wasser bindet, wirkt sich auf die Zellfeuchtigkeit und die Geweberegeneration aus.

Es revitalisiert und strafft dehydrierte, fahle und faltige Haut, befeuchtet das Gewebe und sorgt für Kohäsion und Schmierung gegen äußere Aggressionen.

**VITAMIN C:** Ascorbinsäure wirkt als Antioxidans, hemmt die Bildung freier Radikale, verhindert und behandelt die Melaninüberproduktion und hemmt die Tyrosinase, die die durch UVA-Strahlung verursachte Lichtalterung korigiert.

Außerdem stimuliert es die Kollagensynthese aus den Broblasten und verleiht der Haut Ausstrahlung und Straffheit.

**ORGANISCHES SILIZIUM:** aktiviert die Bildung von Kollagen, Elastin und Proteoglykanen. Es wirkt sowohl gegen Fäulnis als auch heilend und erweist sich als sehr nützlich für die Hydratation des Gewebes. Es stärkt die Zellmembranen, wirkt als Verstärker und verbessert die altersbedingte Erschlaffung des Gewebes

**BOTOX LIKE:** ein natürliches Peptid, das die Freisetzung von Acetylcholin modifiziert, so dass die Muskelkontraktionen vermindert und die Muskeln entspannt werden, wodurch die Bildung neuer Falten verhindert und bestehende Falten gemildert werden. Durch diese dekontrahierende Wirkung wird ein echter "Botox-ähnlicher" Effekt erzielt, insbesondere im Bereich der Augen, des Mundes, der Stirn und des Halses.

**ANTI-AGING & STRAFFUNGS-BOOSTER:** ein potenter Cocktail, der dank über 50 Wirkstoffen wie Hyaluronsäure, DMAE und Vitamin C eine maximale Leistung in seiner reparierenden, regenerierenden, antioxidativen und beruhigenden Funktion erzielt, von innen nach außen.

-Selvert Thermal bietet Fachleuten eine intensive und wirksame Behandlung für Gesicht, Hals und Dekolleté, indem es die Mikropunkturtechnik mit dem ST Pen + Cosmetical Lab kombiniert, einem kosmetischen Produkt, das mit einer sehr exklusiven und hochwirksamen Formulierung auf hohem Niveau ab der ersten Anwendung entwickelt wurde.

**GEBRAUCHS-  
ANWEISUNG  
ST PEN**

Es muss ein Raster gezeichnet werden. Pro Gebiet sollten maximal 2 - 4 Anwendungen gemacht werden.



**ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN**

Desinfizieren Sie die zu behandelnde Stelle vor der Anwendung des ST PEN.

Nach der Behandlung mit dem ST PEN die S.O.S.-Creme auftragen und kalt stellen.

In Monaten mit intensiver Sonneneinstrahlung sollte täglich eine SPF-Creme verwendet werden.

**GEBRAUCHS-  
ANWEISUNG-ST PEN**

## VORBEHANDLUNG UND GEGENINDIKATIONEN

Schwangere und Stillende.

Personen, die mit Antikoagulantien behandelt werden. Schwere Herzkrankheiten, Krebs oder Hautkrankheiten.

Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe. Personen unter 18 Jahren.

Topische Autoimmunbehandlungen und Behandlungen mit Retinsäure oder mit Stoffen, die eine Überempfindlichkeit der Haut hervorrufen können, müssen 24 Stunden vor der Behandlung abgebrochen werden. Die Behandlung sollte nicht durchgeführt werden bei schwerer oder aktiver Akne, Rosazea oder entzündlichen Hautprozessen durchgeführt werden.

Nicht bei Personen anwenden, die eine orale Retinsäurebehandlung erhalten haben, bis 6 Monate nach der letzten Behandlung.

Vermeiden Sie 24 Stunden vor der Anwendung Sonneneinstrahlung und Sonnenbrände. Die Haut sollte sauber und frei von jeglichen Make-up-Spuren sein.

Die Applikatornadeln können nicht wiederverwendet werden: es handelt sich um ein Einwegprodukt.

## NACHBEHANDLUNG

Vermeiden Sie die Sonnenexposition für die folgenden 5 Tage oder im Falle einer anhaltender Entzündung. Es ist normal, dass im behandelten Bereich Rötungen und Wärme auftreten. In den ersten 3 Tagen wird die Haut trocken und gespannt sein.

## VORTEILE

**Schnelligkeit:** Sie ist viel schneller als manuelle Behandlungen. Kürzere Behandlungen. Tiefe der Nadelköpfe. Hohe Wirksamkeit von der ersten Sitzung an. Für die Anwendung im Gesicht und am Körper.

## L'ESPRIT DERMATOLOGIQUE LAB PROTOKOLL

Das Ziel des L'Esprit Dermatologique LAB und des ST Pen kombinierte Protokolls ist, den Zustand der Haut zu personalisieren und zu verbessern.

### ZIELE

- o L'Esprit Dermatologique LAB deckt die besonderen Bedürfnisse eines jeden Hauttyps. Feuchtigkeit spenden, regenerieren, reparieren, auffrischen
- o Anpassung und Personalisierung, um der Haut Elastizität zu verleihen, sie vorzubereiten und zu verjüngen sind einige der Hauptziele.

### AKTIVE BESTANDTEILE

- o Hyaluronsäure (10 x 2 ml)
- o Organisches Silizium (10 x 2 ml)
- o Botox Like (10 x 2 ml)
- o Vitamin C (10 x 2 ml)
- o Anti-Aging & Straffender Booster (Cocktail 10 x 2 ml)

### DAUER UND HÄUFIGKEIT

- o Die Behandlung besteht aus 5 Sitzungen, die einmal wöchentlich stattfinden. Sie kann maximal dreimal pro Jahr durchgeführt werden, mit einer empfohlenen Mindestpause von 1-2 Monaten, je nach Fall, um die Regeneration des Gewebes zu ermöglichen.

\*Im Verlauf des Protokolls werden die Behandlungsmöglichkeiten in jeder Sitzung erläutert.

### BENÖTIGTE PRODUKTE

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| o Ref. 319106 Hyaluronsäure                       | Ref.301201 Brume Thermale       |
| o Ref. 319107 Vitamin C                           | Ref.313102 Lait Hygiénisant     |
| o Ref. 319108 Organisches Silizium                | Ref.313103 Mousse Hygiénisant   |
| o Ref. 319109 Botox Like                          | Ref.301104 Lotion Tonique Douce |
| o Ref. 319110 Anti-ageing & Firm.                 | Ref.301105 Lotion Tonique R.    |
| o Ref. 316103 Crème Sos                           | Ref.313106 Démaquillant Yeux    |
| o Ref. 308104 Cell Vitale Osmotic – Antioxydant   |                                 |
| o Ref. 308106 Cell Vitale Osmotic - Hydratant     |                                 |
| o Ref. 308105 Cell Vitale Osmotic - Raffermissant |                                 |
| o Ref. 308107 Cell Vitale Osmotic - Apaisant      |                                 |

**ALLGEMEINE  
LEITLINIEN**

**ERSTER KONTAKT:**

Informieren Sie den Kunden über die Behandlung und die möglichen Reaktionen. Füllen Sie für jeden Kunden ein technisches Formular aus. Unterschreiben Sie das Dokument zur Einwilligung nach Aufklärung.

**SALON-BEHANDLUNG:**

Reinigen Sie die Haut und tragen Sie ein Antiseptikum auf. Handschuhe benutzen. Tragen Sie die gewählten Produkte auf und fahren Sie mit den gewählten Parametern fort. Sobald die Mikropunktur beendet ist, die SOS-Creme auftragen (eine gute Schicht, um den behandelten Bereich zu bedecken). Mit einer Zellulose- oder Tissue-Maske abdecken und kalt auftragen, um die Poren zu schließen und die Wirkung der Behandlung zu verstärken (5-10 Minuten einwirken lassen). - Zur Vervollständigung einer umfassenden und individuellen Behandlung kann die Kaltmaske durch die Cell Vitale Osmotic (Peel-off-Maske) ersetzt werden. Tragen Sie abschließend eine weitere Schicht der SOS-Creme und des Sonnenschutzes auf.

**ST PEN PARAMETER:**

Gesicht –Hals –Dekolleté  
TIEFE: zwischen 0,25 und 0,50  
KOPF: 36 Punkte  
FARBE: **ROT** oder **LILA**

**BASISPROTOKOLL (reife, alternde, feuchtigkeitsarme, schlaffe und devitalisierte Haut)**

**MAKE-UP ENTFERNEN**

Augen und Lippen mit Désmaquillant des Yeux

Gesicht, Hals und Dekolleté mit Lait Hygiénisant (für trockene Haut) oder mit Mousse Hygiénisante (für fettige Haut)

Das Gesicht mit zwei feuchten Wattepaden benetzen und trocknen lassen: Lotion Tonique Douce für trockene Haut. Lotion Tonique Rééquilibrant für fettige Haut. Brume Thermale auf Gesicht, Hals und Dekolleté aufsprühen. Trocknen lassen.



**SCHRITTFÜR  
SCHRITT**

### Peeling

Um die Zellerneuerung zu fördern und als Antioxidans und Feuchtigkeitsspender zu wirken, das Peeling Doux Lactobionique auftragen. Geben Sie 4-5 Pumpstöße in eine Schale und verteilen Sie sie mit einem Pinsel auf Dekolleté, Hals und Gesicht. Etwa 5-10 Minuten einwirken lassen. In den letzten zwei Minuten emulgieren und mit reichlich Wasser abspülen. Abtrocknen und aufsprühen.

### Häufigkeit der Verwendung - l'Esprit Dermatologique LAB

1. Sitzung – HYALURONSÄURE
2. Sitzung - ORGANISCHES SILIZIUM
3. Sitzung - BOTOX LIKE
4. Sitzung - VITAMIN C
5. Sitzung - ANTI-AGEING & FIRMING BOOSTER

Hinweis: Die Reihenfolge der Anwendung von l'Esprit Dermatologique LAB kann je nach den Bedürfnissen der Haut, der Diagnose und den Kriterien des Fachmanns variieren.

Tragen Sie eine dünne Schicht SOS-Creme auf.

### Maske

Um der Haut eine individuelle Antwort zu geben, tragen Sie eine der 4 Osmose-Masken von Cell Vitale auf (Antioxidant, Raffermissant, Hydratant oder Apaisant). Geben Sie den Inhalt beider Beutel (Gel und Pulver) in eine Schüssel. Beide Phasen 90 Sekunden lang miteinander vermischen. Auf Hals und Gesicht auftragen, dabei die Augen und Lippen bedecken. 15-20 Minuten einwirken lassen und in einem Stück abnehmen.

Zum Abschluss der Behandlung die SOS-Creme auftragen. Falls erforderlich, können Sie zum Abschluss Sonnenschutzmittel auftragen.

**PFLEGE ZU  
HAUSE**

- |  |   |
|--|---|
| Ref 319201 Eye Bags & Darg Circles Balm.         | Ref 319210 Ox. and Pol. Protector (10 X 2ml).   |
| Ref 319204 White Perfection Clarity – Die Creme. | Ref 319211 Day & Night Dna Repairer (10 X 2ml). |
| Ref 319205 White Perfection Clarity – Das Serum. | Ref 319216 Firming Flash (10 X 2ml).            |
| Ref 319206 Anti-ageing – Die Creme.              | Ref 319218 Moisturising (10 X 2ml).             |
| Ref 319207 Anti – Ageing – Das Serum.            |   |
| Ref 319208 Anti- Ageing (10 X 2ml).              |   |
| Ref 319209 Regeneration (10 X 2ml).              |   |

## ST PEN UND CORPORELLE LABORPROTOKOLL

ST PEN ist ein sterilisiertes und austauschbares Mikronadelgerät für das Micro-Needling der Haut. Dieses Mikro-Punktionssystem stimuliert automatisch die Broblasten und fördert so die Bildung von Kollagen und Elastin zur Straffung und Verjüngung der Haut. Die automatisierte Nadeleinführung des ST PEN minimiert Schmerzen und Unbehagen und stärkt gleichzeitig die Leitungskanäle, was die Absorption und transepidermale Wirkung der Wirkstoffe begünstigt.

CORPORELLE LAB vereint die fortschrittlichste Technologie, um die wichtigsten Probleme der männlichen und weiblichen Haut mit hoher Wirksamkeit und Sicherheit zu behandeln. Durch seine Konzentrate können optimale Ergebnisse bei der Behandlung von Cellulite, Fett und Hauterschaffung erzielt werden, die schon bei der ersten Anwendung lang anhaltende und deutlich sichtbare Ergebnisse liefern. Phosphatidylcholin-Konzentrat (5%): Sojalecithinderivat, das eine starke lipolytische Wirkung hat, um Fettablagerungen zu emulgieren, so dass sie leichter aufgelöst, transportiert und ausgeschieden werden können.

L-Carnitin-Konzentrat (20%): Reguliert die Verwendung von Lipiden durch den Muskel und transportiert Fettsäuren auf zellulärer Ebene. Daher wird es zu einer wichtigen Fettverbrennungsbehandlung, die wirksam Orangenhaut bekämpft und die Figur formt.

Artischocken-Konzentrat (2%): Der Artischockenextrakt stimuliert die Fettabsorption und hat gleichzeitig hamtreibende und entwässernde Eigenschaften.

DMAE Konzentrat (2.5%): Vorläufer von Acetylcholin (in der Membranstruktur der Zellen enthalten), mit einer starken antioxidativen und beruhigenden Wirkung. Es modifiziert den Hautton und macht die Haut fester und elastischer. Es wird leicht absorbiert und stimuliert die Kontraktion der epidermalen Keratinozyten und Myofibroblasten, wodurch ein sofortiger Lifting-Effekt erzielt wird.

**Straffender und entwässernder Booster(Cocktail):** Seine leistungsstarke Wirkstoffmischung verstärkt wirksam die Anti-Erschlaffungs-Behandlungen und hilft, die Spannkraft zu erhöhen. Es wirkt daher gegen Cellulite und Fett durch Definierung der Figur.

SELVERT THERMAL bietet Fachleuten eine intensive Behandlung gegen Cellulite, Fett und Erschlaffung, die die ST PEN-Mikropunkturtechnik mit Corporelle Lab kombiniert, einer kosmetischen Behandlung, die mit einer exklusiven Formel auf hohem Niveau entwickelt wurde und bereits bei der ersten Anwendung wirksam ist.

**VERWENDUNG-  
ST PEN**

Es muss ein Raster gezeichnet werden. Es sollten maximal 2 - 4 Aufträge pro Fläche erfolgen.



**VERWENDUNGSEMPFEHLUNGEN**

Desinfizieren Sie die zu behandelnde Stelle, bevor Sie den ST PEN auftragen. Nach der Behandlung mit dem ST PEN tragen Sie S.O.S. Cream und Kälte. Nach 24 Stunden wird dringend empfohlen, eine manuelle Drainage des Bereichs oder eine Presstherapie durchzuführen. In Monaten mit intensiver Sonneneinstrahlung sollten Sie täglich eine SPF-Creme verwenden.

**GEBRAUCHS-  
ANWEISUNG-ST PEN**

**VORBEHANDLUNG UND GEGENINDIKATIONEN**

Schwangere und Stillende.

Personen, die mit Antikoagulantien behandelt werden. Schwere Herzkrankheiten, Krebs oder Hautkrankheiten.

Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe.

Personen unter 18 Jahren.

Topische Autoimmunbehandlungen und Behandlungen mit Retinsäure oder mit Stoffen, die eine Überempfindlichkeit der Haut hervorrufen können, müssen 24 Stunden vor der Behandlung abgebrochen werden.

Die Behandlung sollte nicht bei schwerer oder aktiver Akne, Rosazea oder entzündlichen Hautprozessen durchgeführt werden.

Nicht bei Personen anwenden, die eine orale Retinsäurebehandlung erhalten haben, bis 6 Monate nach der letzten Behandlung.

Vermeiden Sie 24 Stunden vor der Anwendung Sonneneinstrahlung und Sonnenbrände. Die Haut sollte sauber und frei von jeglichen Make-up-Spuren sein.

Die Applikatorenadeln können nicht wiederverwendet werden: es handelt sich um ein Einwegprodukt.

**NACHBEHANDLUNG:**

Vermeiden Sie Sonneneinstrahlung für die folgenden 5 Tage oder im Falle eines anhaltenden Sonnenbrandes. Es ist normal, dass im behandelten Bereich Rötungen und Wärme auftreten. In den ersten 3 Tagen wird die Haut trocken und gespannt sein.

**VORTEILE:**

Schnelligkeit: Sie ist viel schneller als manuelle Behandlungen. Kürzere Behandlungen. Einstellbare Tiefe der Nadelköpfe. Hohe Wirksamkeit von der ersten Sitzung an. Für die Anwendung im Gesicht und am Körper.

## BEHANDLUNG VON FETT UND / ODER CELLULITE

Kombiniertes Protokoll von Corporelle Lab und ST PEN zur Förderung und Stimulierung des Stoffwechsel des Körpers und diesen zu fördern und zu stimulieren. Von der Lipolyse bis zur Entwässerung von Fett und Cellulite.

### ZIELE

- Stimuliert die Lypolyse
- Verringert die Dicke des Fettgewebes
- Verkleinerung / Modellierung
- Verstoffwechselt Fette und erleichtert deren Ausscheidung
- Reinigend und entwässernd

### AKTIVE BESTANDTEILE

- Phosphatidylcholine 5% (10 x 5 ml)
- L-Carnitin-Konzentrat 20% (10 x 5 ml)
- Artischocken-Konzentrat 2% (10 x 5 ml)
- DMA Konzentrat 2.5% (10 x 5 ml)
- Straffender und entwässernder Booster (Cocktail 10 x 5 ml)

### DAUERUND HÄUFIGKEIT

- Je nach den Bedürfnissen des zu behandelnden Bereichs und den Empfehlungen des Fachmanns werden 1-3 vollständige Zyklen zur Behandlung von Fett und/oder Cellulite durchgeführt.  
\*Im Protokoll wird erklärt, was ein Zyklus ist.

### BENÖTIGTE PRODUKTE

- Ref. 315119 DMA-Konzentrat
- Ref. 315120 ARTICHOKE-Konzentrat
- Ref. 315121 L- CARNITIN-Konzentrat
- Ref. 315122 PHOSPHATIDILCOLINE
- Ref. 315119 STRAFFENDER UND ENTWÄSSERNDER BOOSTER ((Cocktail)
- REF 316103 CRÈME SOS

**SCHRITTFÜR  
SCHRITT**

**ERSTER KONTAKT**

Informieren Sie den Kunden über die Behandlung und mögliche Reaktionen.  
1 Füllen Sie für sich und den Kunden die Einverständniserklärung aus  
2 Vergewissern unterschrieben ist..

**KABINENBEHANDLUNG**

Reinigen Sie den Bereich mit einem antiseptischen Produkt.  
Handschuhe verwenden.

Markieren Sie den zu reduzierenden Bereich mit einem Stift, während der Kunde steht. Reinigen Sie den Bereich und tragen Sie ein Antiseptikum auf.

Tragen Sie die gewählten Produkte auf und fahren Sie mit den gewählten Parametern fort. Sobald das Microneedling abgeschlossen ist, tragen wir die S.O.S.-Creme auf (eine gute Schicht für jeden bearbeiteten Bereich).

Mit einem Papiertuch abdecken und Kälte auftragen, um die Poren zu schließen und die Arbeit zu festigen. 5-10 Minuten einwirken lassen.

Zum Abschluss eine weitere Schicht S.O.S.-Creme auftragen.

**ST PEN PARAMETER**

Fett - Cellulite

TIEFE: 1 mm

KOPF: 9 Nadeln

FARBE: **GREEN**

Für den REDUZIERUNGSZYKLUS können bis zu 3 aufeinanderfolgende Zyklen durchgeführt werden.

**ABSCHLIESENDE  
BEHANDLUNG** durch die Anwendung von DMA in einer Woche und Anwendung von Firming & Draining in der folgenden Woche

ANWENDUNG

	PHOSPHATIDILCOURINE	L- CARNITINE	ARTISCHOKE	DMA	FIRMING AND DRAINING
1.Woche					
2. Woche					
3.Woche					

SCHRITTFÜR  
SCHRITT

Noiz: VERRINGERUNG DES ZYKLUS : Der gesamte Zyklus muss durchgeführt werden, ebenso können maximal 3 aufeinanderfolgende Reduktionszyklen durchgeführt werden. Wir beenden die Behandlung immer mit der FINALISE-BEHANDLUNG\*. Nach der Behandlung empfehlen wir als Erhaltungsphase 2 - 3 Firming & Draining-Sitzungen (alle 2 - 3 Wochen).

**Wichtig:**

Wir empfehlen dringend, 24 bis 48 Stunden nach jeder Sitzung eine Pressotherapie oder manuelle Drainage durchzuführen.

Die Fachkraft kann maßgeschneiderte Behandlungsprogramme erstellen, d. h. 72 Stunden nach der Corporelle Lab + ST PEN-Sitzung kann zwischen Kavitation, Thermotheapie IR, Ultraschall, Diathermie, Radiofrequenz, Sonophorese, Iontophorese, Massagetechniken usw. gewechselt werden.

PFLEGE ZU  
HAUSE

- Réf. 315205
- Réf. 315202

Firming, Anticellulite and Moisturising 3 & 1.  
Crème Minceur Anticellulite

## BEHANDLUNG FÜR SCHLAFTE HAUT

Kombiniertes Protokoll von Corporelle Lab und ST PEN zur Förderung und Stimulierung des Gewebes, zur Stärkung des Elastins, zur Kollagensynthese und damit zur Straffung, Vergrößerung und Festigung des Gewebes, um einem Mangel an Körperdichte entgegenzuwirken.

### ZIELE

- Antioxidans - Straffend
- Modifiziert den Hautton und macht die Haut fester und elastischer
- Aktiviert Kollagen, Elastin und Proteoglykane
- Kompakt und umgestaltet

### WIRKSTOFFE

- DMA Konzentrat 2,5% (10 x 5ml)
- Straffender und entwässernder Booster (Cocktail 10 x 5ml)

### DAUER UND HÄUFIGKEIT

- Je nach den Bedürfnissen des zu behandelnden Bereichs und den Empfehlungen des Fachpersonals werden 1 - 3 vollständige Zyklen zur Behandlung der Erschlaffung durchgeführt.

\*Im Protokoll wird erklärt, was ein Zyklus ist.

### BENÖTIGTE PRODUKTE

- Ref. 315119 DMA Konzentrat
- Ref. 315119 STRAFFENDER UND ENTWÄSSERNDER BOOSTER(Cocktail)
- Ref. 316103 CRÈME SOS

HINWEIS: Die rosa gekennzeichneten Produkte entsprechen der "Ligne de Régénération Absolue".



**SCHRITT FÜR  
SCHRITT**

**ERSTER KONTAKT**

Informieren Sie den Kunden über die Behandlung und mögliche Reaktionen.

1 Füllen Sie für jeden Kunden ein Formular aus.

2 Vergewissern Sie sich, dass die Einverständniserklärung unterzeichnet ist.

**KABINENBEHANDLUNG**

1)- Reinigen Sie den Bereich mit einem antiseptischen Produkt. Tragen Sie Handschuhe.

2)- Markieren Sie den zu reduzierenden Bereich mit einem Stift, während der Kunde steht.

3)- Reinigen Sie den Bereich und tragen Sie ein Antiseptikum auf.

4)- Wenden Sie die ausgewählten Produkte an und fahren Sie mit den gewählten Parametern fort.

5)- Sobald das Microneedling abgeschlossen ist, tragen wir die S.O.S.-Creme auf (eine gute Schicht für jeden behandelten Bereich).

6)- Mit einem Papiertuch abdecken und Kälte auflegen, um die Poren zu schließen und die geleistete Arbeit zu festigen. Lassen Sie für 5-10 Minuten einwirken.

7)- Zum Abschluss eine weitere Schicht S.O.S.-Creme auftragen.

**ST PEN PARAMETERS**

Erschlaffung

TIEFE: 0.5 mm/1 mm

KOPF: 12 Nadeln

FARBE: GRÜN - DUNKEL BLAU - HELL BLAU

**ERSCHLAFUNGSPROTOKOLL**

**LEICHTE ERSCHLAFUNG**

4 - 6 Sitzungen werden wöchentlich unter Anwendung der DMA abgehalten.

**STARKE ERSCHLAFUNG**

8 - 10 Sitzungen werden wöchentlich unter Anwendung der DMA abgehalten.

**BEHANDLUNGSABSCHLUSS**

Die Behandlung wird durch die Anwendung von FIRMING & DRAINING abgeschlossen (4 - 5 wöchentliche Sitzungen)

- Ref. 315205 Firming, Anticellulite and Moisturising 3 & 1.
- Ref. 315203 Crème Raffermissante Effect Push-Up.

Made in Spain under license by IDESCO, S.A. - Barcelona 08030, C/Costa Brava, 30 5º

Produced in the European Union - tel. -34- 93 345 94 50

e-mail: [idesco@selvert.com](mailto:idesco@selvert.com) - [www.selvertthermal.com](http://www.selvertthermal.com)

**Ref. 315P02**